

The logo for Glaps features the word "Glaps" in a dark grey, rounded sans-serif font. The letter "G" is stylized with a green circular element inside it, which is partially open at the top and bottom, creating a sense of motion or a globe. The background is a light grey gradient with a pattern of thin, white, curved lines that create a sense of depth and movement.

Glaps

GLOBAL AESTHETICS PRODUCTS & SERVICES



ESPATULA PREMIUM GREEN CON DISPLAY

Presentación
Comercial.

Espátula Premium Green con display



Las espátula Premium Green con display pertenece a una nueva generación de aparatología enfocada al peeling no agresivo. Usando las propiedades del ultrasonido, ofrece una regeneración segura, sin dolor y muy efectiva. Remueve las capas superficiales de la piel mediante una exfoliación mecánica, mientras que estimula el rejuvenecimiento de la misma. El ultrasonido es una onda de vibración de alta frecuencia que se utiliza en medicina y en cosmética.

Produce un efecto de resonancia suave en la piel a baja energía y vibración de alta frecuencia, mejorando la permeabilidad cutánea, reduciendo el tamaño de los poros, ayudando a la desobstrucción de los mismos.

Normaliza las secreciones sebáceas y sudoríparas. El dispositivo ultrasónico utiliza nanotecnología molecular, vibrando 24000 veces por segundo de intensa fricción. Combinándola al mismo tiempo con los productos adecuados esta acción produce un masaje profundo que mejora la micro-circulación, aumentando la penetración del cosmético, la nutrición y oxigenación de la piel, logrando un efecto altamente significativo.

Ficha Técnica

Nombre del Producto	
Color	Verde
Material	ABS + acero inoxidable
Tamaño & peso	163 gr. 16,8*5,0*2,0 mm
Packaging	Gift Box
Tamaño packaging	52*46*32cm
Características tecnológicas	Ultrasonido de alta frecuencia 24.000 hz
Especificaciones	Alta frecuencia / Corriente Galvánica / EMS
Voltage de salida	5V- 1A
Voltage de entrada	AC 100V-240V 50HZ /60HZ
Adaptador	Cargador USB
Capacidad de la batería	3,7 v/ 600mAh
Tiempo de carga	1 hora
Tiempo de autonomía	2 horas
Frecuencia de uso	2-3 veces por semana



MODO DE USO

Presione el botón de encendido durante 1 segundo para encender o apagar el dispositivo. El mismo cuenta con 4 funciones: modo limpieza (cleaning mode), modo lifting, modo ion+, modo ion-. Pulsando el botón de encendido se cambia de funciones. El dispositivo se apagará automáticamente después de trabajar 9 minutos tal como se puede visualizar en la pantalla.



Modo limpieza: el símbolo de limpieza se visualiza en la pantalla. Aplique gel de limpieza o neutro. Deslice suavemente el dispositivo con el ángulo hacia abajo o hacia arriba en 45° siguiendo las líneas del rostro.

Modo Lifting: el símbolo del modo lifting aparece en la pantalla. Aplique el producto en la zona a tratar y realice movimientos suaves con la espátula de abajo hacia arriba con ángulo de 45°.

Modo Ion +: El símbolo de ion + se visualiza en la pantalla. Realice movimientos suaves de arriba hacia abajo con ángulo de 45° con el lado plano de la pala quirúrgica

Modo Ion -: El símbolo de ion- se visualiza en la pantalla. Realice movimientos suaves de abajo hacia arriba con el lado plano de la pala quirúrgica

Es ideal combinar el uso de la espátula ultrasónica con productos cosméticos como geles, lociones, serums, gel cream o ampollas, con activos acordes a cada necesidad de la piel o momento de tratamiento. En todos los modos la piel debe permanecer húmeda durante el proceso de aplicación.



Garantía Glaps

Recuerda que todos los equipos de Glaps cuentan con 6 (seis) meses de garantía por mal funcionamiento. Con la factura de compra y la garantía menor o igual a 6 meses enviar un mail a ventas@glaps.com describiendo el problema del dispositivo. Adjuntar video y/o fotos.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿De donde se enciende?

Mantener el botón de power presionado durante dos segundos y el equipo se enciende observándose la activación del display.

¿Cómo sé si tiene batería suficiente?

Una de las ventajas de la Espatula Premium Green es que el display nos muestra el consumo de la batería como las funciones programadas

¿Puedo aplicarlo en una piel sensible?

En las funciones de nutrición y lifting no hay inconveniente, pero en la de Cleasing si se realiza presión es probable que se irrite, puede hacerse de modo mas suave y complementar luego el tratamiento con el Masajeador frío calor (función frio)

¿Puedo aplicarla en otras partes del cuerpo más allá del rostro?

Por supuesto, los hombros, espalda o pecho suelen ser lugares de concentración de comedones y células muertas para realizar una acción de peeling.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué contraindicaciones tiene?



Al trabajar con ultrasonido de alta frecuencia se evita su uso con embarazadas
Personas con marcapasos o trasplantes. Implantes metálicos de importancia. Enfermedades de la piel, erupciones, quemaduras, infecciones o heridas abiertas.

¿Cuántas veces debo usar el equipo para ver resultados?

En la función cleasing se recomienda no mas de 2 veces por semanas. En las otras dos funciones no hay restricciones de uso.

¿Funciona con alguna marca de cremas / geles en particular?

Los equipos Glaps sinergizan con todas las buenas marcas presentes en el mercado no obstante recomendamos el uso del Deep Clean de Glaps y los Ionic C / Ionic H para los mejores resultados

¿Hay algún paso a paso donde pueda guiarme para los diferentes tratamientos?

En nuestra página oficial puedes consultar los diferentes protocolos de uso y su paso a paso mas la recomendación de los productos a utilizar: www.glaps.com

ACCION DE LA ESPATULA ULTRASONICA EN NUESTRA DERMIS



Limpieza profunda


Nutrición

Limpieza diaria

DEEP CLEANSING

Clean cuticle:

With the help of water , supersonic vibration can
cream the cuticle and clean in a moment

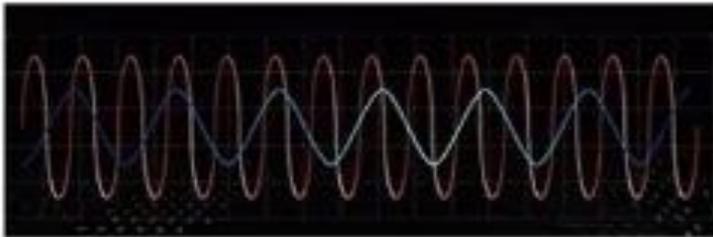

CLEAN CUTICLE

- + Ion for face deep leaning , - Ion for help skin absorbing nutrition + Ion deeply cleaning the skin of impurities can cause a dull and lifeless appearance .
- Ion improve the absorption of essence , and also improves oxygenation and circulation

Descripción del producto



Display que muestra la selección

Un dispositivo para múltiples soluciones

The diagram illustrates the multi-functional capabilities of the device through a grid of skin conditions and their corresponding treatments. The conditions are: Acné, Poros, Nutrición, Comedones, Firmeza, Manchas, and Piel oleosa. The device is shown as a green handheld unit with a digital display and a silver applicator head.

 Acné	 Poros	 Nutrición
 Comedones	 Firmeza	
 Manchas	 Piel oleosa	

Ultrasonic Vibration for Deep Cleansing



Ultrasonido de alta frecuencia para barrer las células muertas y las impurezas

